

## Sondas esofágicas de poliuretano B. Braun

- Las propiedades termoplásticas del poliuretano minimizan el trauma tisular, haciéndolo ideal para las implantaciones a largo plazo.
- Incorporan una banda radiopaca que permite verificar la colocación del tubo.
- Para facilitar la alimentación por sonda, éstas incorporan una conexión en embudo y un tapón de dos piezas. La dieta para nutrición enteral se administra por la conexión en embudo, mientras que la limpieza del tubo o la administración de dietas más líquidas, agua o medicaciones se realiza a través de la conexión Luer del tapón.
- Apropriadas para la administración de dietas comerciales de nutrición enteral.
- Longitud 50 cm.
- Diámetro externo 4,8 mm / 15 Ch.
- Envase individual estéril.

### Consejos para el mantenimiento de las sondas:

antes y después de administrar comida –o cada 4/8 horas– la sonda debe ser aclarada con agua a temperatura corporal. Las sondas atascadas pueden desatascarse con bebidas carbónicas. El aclarado debe realizarse con cuidado, usando una presión adecuada.




Tapón con conexión Luer



Conexión en embudo



Banda radiopaca

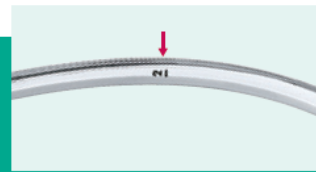

Marca de longitud



Extremo redondeado con orificios laterales