

Rápido y fácil

Además de ser seguro, el método también es rápido. BiopSafe está siempre a mano, y solo le llevará unos segundos colocar la biopsia en el vial y presionar para añadir la formalina. Esta sencilla operación ahorra tiempo y asegura que médicos y enfermeras puedan concentrarse en otros temas importantes. Al mismo tiempo, el transporte al laboratorio es seguro y sencillo.

Manipulación segura de biopsias en 6 pasos

Solo se necesitan unos segundos para que la biopsia quede cubierta de formalina de forma segura y esté lista para el transporte.

Toda manipulación se realiza en un sistema herméticamente cerrado, lo que impide que se produzcan derrames o que salga vapor del vial.

1



Desenrosque la tapa

2



Coloque la biopsia en el vial

3



Enrosque la tapa y apriete

4



Presione el pulgar para liberar la formalina

5



La biopsia se sumerge en la formalina

6



La biopsia está lista para ser transportada de forma segura

2 tamaños

Disponemos de viales en 2 tamaños: 20 ml y 60 ml. Esto permite manipular más biopsias a la vez. Cada biopsia puede colocarse en un casete y disponerse con otros casetes en un contenedor antes de enroscar la tapa y liberar la formalina.

