

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CPK SPORT

Venda elástica cohesiva rasgable de
compresión

Clasificación (RD1591/2009): Clase I

Nº Organismo notificador CE: -

Fabricante: FARMABAN s.a.



CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	CODIGO EAN 13	UNIDAD DE VENTA
1500	BEIGE	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251500 8	48
1501	BEIGE	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251501 5	30
1502	BEIGE	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251502 2	30
1503	BEIGE	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251503 9	30
1504	ROJO	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251504 6	48
1505	ROJO	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251505 3	30
1506	ROJO	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251506 0	30
1507	ROJO	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251507 7	30
1508	AZUL	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251508 4	48
1509	AZUL	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251509 1	30
1510	AZUL	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251510 7	30
1511	AZUL	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251511 4	30
1512	VERDE	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251512 1	48
1513	VERDE	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251513 8	30

1514	VERDE	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251514 5	30
1515	VERDE	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251515 2	30
1516	NEGRO	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251516 9	48
1517	NEGRO	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251517 6	30
1518	NEGRO	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251518 3	30
1519	NEGRO	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251519 0	30
1520	SURTIDO	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251520 6	48
1521	SURTIDO	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251521 3	30
1522	SURTIDO	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251522 0	30
1523	SURTIDO	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251523 7	30

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de CPK SPORT está constituida por:

- Tejido no tejido elástico longitudinalmente con la siguiente composición:
 - polipropileno 91%.
 - elastano 9%.
- Masa cohesiva sin látex dispuesta en forma de fina capa aplicada uniformemente sobre la superficie de la venda.
- Centro de polipropileno o similar.
- Bolsa de polipropileno transparente microperforada.

2. ENVASADO

2.1 Envase presentación o de venta:

- Caja de cartón corrugado con 24 o 15 unidades.
- Bolsa de plástico retráctil (polietileno) con 2 envases de 24 o 15 unidades, lo que constituye la unidad de venta.

3. DESCRIPCIÓN

Venda cohesiva de compresión sin látex de elasticidad longitudinal fácilmente rasgable en sentido transversal. Disponible en varios colores: beige, rojo, azul, verde y negro.

4. PROPIEDADES

Gracias a su elasticidad longitudinal y a su efecto cohesivo permite un vendaje rápido, sin pliegues, fiable y afín a la piel.

No se adhiere a la piel, cabello o ropa, sólo se fija sobre sí misma. Totalmente antideslizante. Cómoda, ligera, porosa, fácil de aplicar y moldeable. Permeable al aire y a vapor.

Resistente a ungüentos, pomadas y transpirable.

Esterilizable por vapor sin su envase original. La esterilización puede afectar a las características del producto (color, tacto y parámetros físicos), no obstante no impide su utilización.

Permeable a los rayos X.

No contiene látex.

Características técnicas:

Peso por m ² en tensión máxima (g/m ²), sin adhesivo	38 +/- 2
Extensibilidad (%)	Min. 75
Longitud máxima en tensión (m)	≥ 4,5
Ancho (cm)	2,5 +/- 0,2
	5,0 +/- 0,2
	7,5 +/- 0,2
	10,0 +/- 0,2

5. INDICACIONES

Vendajes de compresión, soporte, alivio y fijación.

Profilaxis de trombosis.

Tratamiento posoperatorio de cirugía de varices.

Vendajes de soporte después de deformaciones, luxaciones y lesiones de músculos y tendones.

Adecuado para vendajes permanentes para el tratamiento de lesiones de tórax.

Vendajes de alivio para el tratamiento posoperatorio de fracturas y lesiones deportivas.

Para aplicación en medicina deportiva, ideal para su uso en combinación con esparadrapo.

6. CONTRAINDICACIONES

No se le conocen.

7. PRECAUCIONES

Producto de un solo uso.

Producto no estéril, no aplicar sobre heridas abiertas y/o zonas de punción con el fin de evitar posibles infecciones al paciente.

No introducir el producto sin esterilizar en zonas estériles (p.ej. quirófanos).

Los vendajes deben revisarse regularmente por profesionales de la medicina con el fin de evitar posibles problemas de circulación, linfáticos y situaciones adversas como síndromes compartimentales.

No aplicar el vendaje con excesiva tensión.

8. CADUCIDAD

3 años almacenado en lugar fresco (entre 5°C y 30°C) y seco en su envase original.