

## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

### LENOPLASTFREE

Venda elástica adhesiva sin látex

Clasificación (RD1591/2009): Clase I

Nº Organismo notificador CE: -

Fabricante: FARMABAN s.a.



CÓDIGO	MEDIDAS	CODIGO EAN 13	UNIDAD DE VENTA
1100	5 cm x 2,7 m	8 4280 12 51100 0	50
1102	7,5 cm x 2,7 m	8 4280 12 51102 4	50
1104	10 cm x 2,7 m	8 4280 12 51104 8	50
1114	5 cm x 2,7 m	8 4280 12 51114 7	60
1115	7,5 cm x 2,7 m	8 4280 12 51115 4	60
1116	10 cm x 2,7 m	8 4280 12 51116 1	60

### 1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de LENOPLAST *free* está constituida por:

- Tejido elástico de algodón 100% blanqueado.
- Masa adhesiva sin látex y sin colofonia dispuesta en forma de fina capa aplicada uniformemente sobre la superficie de la venda.
- Lámina blanca de polietileno de alta densidad o material similar gofrado.
- Centro blanco con bordes no cortantes de polipropileno o similar.

- Bolsa de polipropileno microperforado transparente impreso.

## **2. ENVASADO**

### **2.1 Envase unitario**

- Presentación unitaria:
  - ✓ Bolsa termosellada de polipropileno microperforado transparente impreso.
  - ✓ Caja unitaria de celulosa.
- Presentación Hospitalaria:
  - ✓ Bolsa termosellada de polipropileno microperforado transparente impreso.

### **2.2 Envase presentación o de venta**

- Presentación unitaria:
  - ✓ Caja de cartón corrugado de 50 unidades con estuche.
- Presentación hospitalaria
  - ✓ Caja de cartón corrugado con 30 unidades sin estuche.
  - ✓ Bolsa de plástico retráctil (polietileno) con 2 envases de 30 unidades, lo que constituye la unidad de venta.

## **3. DESCRIPCIÓN**

LENOPLAST *free* es una venda adhesiva elástica longitudinalmente sin látex ni caucho natural, ni colofonia.

## **4. PROPIEDADES**

Debe su extensibilidad a la especial urdimbre del tejido por lo que es elástico en el sentido de la urdimbre o longitudinal.

Presenta falsas orillas que impiden que se deshilache, evitando posibles problemas de estrangulamiento sobre la extremidad donde se aplica el vendaje. Color blanco con línea de guiado central amarilla.

Adhesivo de caucho sintético y óxido de zinc con elevada fuerza adhesiva sobre la piel. En la formulación del adhesivo NO se utiliza látex ni caucho natural, es decir, el adhesivo no presenta las proteínas propias del caucho natural, ni colofonia, responsables de alergias a productos fabricados con dichos materiales.

El adhesivo se dispone sobre el tejido en forma de fina capa porosa y uniforme permitiendo la transpiración de la piel, evitando la maceración de la piel.

Presenta márgenes libres de adhesivo lo que evita lesiones en la piel en vendajes aplicados en periodos largos de tratamiento.

LENOPLAST free presenta un centro inyectado con un diámetro de 18 mm, lo que facilita la aplicación de la venda y evita cortes en las manos del personal sanitario.

#### Características técnicas:

Peso venda (g)	5 cm	54 +/- 10
	7,5 cm	80 +/- 10
	10 cm	106 +/- 10
Ancho (mm)	5 cm	50 +/- 1,5
	7,5 cm	75 +/- 3
	10 cm	100 +/- 3
Diámetro (mm)	60 +/- 5	
Fuerza adhesiva (cN/cm)*	Min. 100	
Extensibilidad (%)**	70 +/- 10	
Recuperación o elasticidad (%)*	Max. 80	
Gramaje adhesivo (g/m <sup>2</sup> )	90 +/- 15	
Longitud inicial (m)**	2,7 (Min. 2,6)	
Longitud máxima o en tensión (m)	4,4-5,0	

\* de acuerdo con Farmacopea europea (1991)

\*\* según DIN 61632

## **5. INDICACIONES**

Vendajes de soporte, compresivos y fijación de apósitos.

## **6. CONTRAINDICACIONES**

Como vendaje compresivo está contraindicado en caso de pacientes con diabetes o afecciones arteriales.

## **7. PRECAUCIONES**

Aplicar siempre la venda sobre la piel limpia y seca.

Para la fijación de apósitos aplicar la venda sin tensión y suavemente desde el centro del apósito hacia los extremos. Nunca fijar un extremo y tirar de la venda para asegurar el extremo contrario (puede producir lesiones cutáneas).

## **8. CADUCIDAD**

3 años almacenado en lugar fresco ( $5 < T \text{ } ^\circ\text{C} < 30$ ) y seco.