

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**SUPRASORB H FINO****Apósito hidrocolidal**

Clasificación (RD1591/2009): Clase IIa

Nº Organismo notificador CE: 0123

Fabricante: Lohmann & Rauscher
International GmbH & Co. KG

CÓDIGO	MEDIDAS	CODIGO EAN 13	UNIDAD DE VENTA
20424	5 cm x 5 cm	40 21447 20424 6	10
20410	5 cm x 10 cm	40 21447 20410 9	10
20411	5 cm x 20 cm	40 21447 20411 6	10
20412	10 cm x 10 cm	40 21447 20412 3	10
20413	15 cm x 15 cm	40 21447 20413 0	5
20414	20 cm x 20 cm	40 21447 20414 7	5

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de Suprasorb H está constituida por:

- Film de poliuretano.
- Capa hidrocoloide compuesta de mayoritariamente de carboximetilcelulosa, copolímero estireno-isopreno-estireno, resinas, aceite mineral, antioxidante (libre de látex).
- Protector de papel siliconado en un lado.

2. ENVASADO

2.1 Envase unitario

- Bolsa sellada de poliéster, polietileno y celulosa.

2.2 Envase presentación o de venta

- Caja de celulosa.
- Instrucciones de utilización.

3. DESCRIPCIÓN

Suprasorb H son apósitos hidrocoloides estériles, finos, de color crema, con una superficie uniforme de diferentes dimensiones envasados individualmente y esterilizados por radiación.

4. PROPIEDADES

Suprasorb H apósitos autoadhesivos, hipoalergénicos, semi-oclusivos que favorecen la curación de heridas difíciles como úlceras por decúbito o úlceras varicosas.

Al entrar en contacto con el exudado de la herida el apósito absorbe las secreciones y forma un gel, creando un ambiente húmedo óptimo para la curación de la herida, y permitiendo el cambio de apósito sin dañar los nuevos tejidos.

El film portador semipermeable de poliuretano proporciona una protección segura frente a microorganismos y a la humedad, no obstante es permeable a gas y al vapor de agua.

5. INDICACIONES

Suprasorb H apósito hidrocoloide está indicado para el tratamiento de las siguientes heridas: úlceras decúbito, úlceras arteriales, úlceras varicosas,

úlceras diabéticas y sitios de separación dermo-epidérmica, siempre y cuando las heridas sean superficiales y de secreción leve.

6. CONTRAINDICACIONES

Heridas infectadas.

7. PRECAUCIONES

No debe utilizarse en presencia de infecciones.

Al utilizarse en úlceras varicosas debe continuarse el correspondiente tratamiento de compresión. También en úlceras por decúbito el tratamiento normal debe continuarse.

Suprasorb H es un producto estéril siempre cuando las condiciones del envase sean correctas (no esté dañado o abierto).

El producto no debe ser utilizado en caso de intolerancia conocida o de alergia a uno o varios componentes.

Un solo uso.

No re-esterilizable.

8. CADUCIDAD

5 años si el producto se almacena en lugar fresco (<25 °C), en posición horizontal, protegido de la humedad y se mantiene en su envase original intacto.