

Thin FOAM BANDAGE

Thin Foam Bandage se moldea fácilmente y proporciona amplia flexibilidad. La venda de espuma autoadherente se adhiere sobre sí misma y no a la piel, ni el pelaje, ni la herida. Es suave, absorbente y puede colocarse directamente sobre la herida.


SIN
LÁTEX

- Solo se adhiere sobre sí misma
- Se puede colocar directamente sobre la herida
- Muchas zonas de uso, p. ej., ubres de vacas




REF 510002379
6 x 450 cm


VENDAJE DE PATAS:

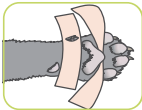


Coloca un trozo de venda entre los dedos y la almohadilla. Haz una ranura en la venda y Colócala alrededor del espalón.

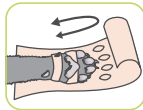

Corta una tira de venda a lo largo. Haz ranuras para que pasen los dedos.

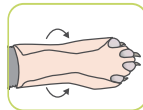

Desliza los dedos por las ranuras y dobla la venda como se muestra.

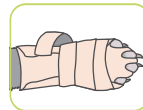


Si fuese necesario, enrolla una tira adicional de venda alrededor de la pata para asegurar el vendaje.



Escanea el código QR para obtener instrucciones detalladas.

VENDAJE DE UBRES:

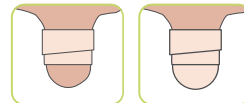

Utiliza Thin Foam Bandage en caso de heridas en ubres o para fijación de tapones pezonera.



Thin Foam Bandage es elástico y autoadherente