

DFV Test COMBO LEA + D

Inmunocromatografía para la detección de anticuerpos contra Leishmania, Ehrlichia y/o Anaplasma spp y otras rickettsiales homólogas. Detecta la presencia de Dirofilaria en perros a partir de suero, plasma o sangre entera.

DESCRIPCIÓN: Detección en un único ensayo de anticuerpos contra *Leishmania infantum* y anticuerpos específicos frente *Ehrlichia canis* y/o *Anaplasma platys*. Pueden detectarse como positivo a *Ehrlichia* + *Anaplasma* algunas muestras infectadas por *Anaplasma phagocytophilum*. Detección en el mismo dispositivo de *Dirofilaria immitis*.

MUESTRAS:

- Se recomienda utilizar muestras de suero
- Sangre con anticoagulante (citrato, EDTA o heparina)
- Plasma

No usar muestras con coágulos o muy hemolizadas.

MODO DE EMPLEO:

Abrir el sobre en el momento de realizar el ensayo y mantener el dispositivo en una superficie plana y sin moverlo hasta finalizar el ensayo.

1. Usando la pipeta, tomar muestra hasta la línea marcada (20 μ l) y depositarla en el pocillo (S).
2. Añadir todo el contenido del vial con la solución tampón en el pocillo de muestra (S).
Repetir el mismo procedimiento en el otro pocillo (S).
Efectuar la lectura a los 10 minutos de que el avance por la membrana sea visible (use reloj).

LECTURA DE LOS RESULTADOS:

Efectuar la lectura de forma independiente para cada ensayo.

Positivo (+) Leishmania: Una banda de color en la zona test 1 y otra en la zona control (C).

Positivo (+) Ehrlichia y/o Anaplasma: Una banda de color en la zona test 2 y otra en la zona control (C).

Positivo (+) Dirofilaria: Una banda de color en la zona test T y otra en la zona control (C).

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C).

No válido (NV): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir el ensayo con un nuevo dispositivo.

CONTENIDO DEL KIT:

- 1 tubo con anticoagulante
- 1 pipeta de plástico
- 2 viales con solución tampón
- 1 sobre que contiene 1 dispositivo

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura ambiente por debajo de 30°C. No necesita refrigeración. No congelar. Proteger de la luz solar directa. Conservado adecuadamente, el producto es estable como mínimo hasta la fecha de caducidad indicada en el mismo.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Cajas de 1 y 20 kits.

Reg. Nº: 10940- RD

