

VETIGEL®

VETIGEL® es un gel hemostático tópico que detiene el sangrado de moderado a severo en menos de 3 segundos. El Kit Dental **VETIGEL®** está específicamente diseñado para su uso en procedimientos dentales y cirugías orales (ej. Para interrumpir el sangrado tras una extracción dental, escisión de masas orales y sangrado gingival).



Uso:	El gel hemostático VETIGEL® es un dispositivo de uso veterinario. Está indicado como dispositivo hemostático complementario para situaciones en que el control del sangrado por presión, ligadura u otros procedimientos convencionales es ineficaz o poco práctico. El Kit Dental VETIGEL® está diseñado para detener el sangrado en procedimientos dentales y cirugías orales.
Presentación:	VETIGEL® (hidrogel coloidal opaco de color tostado) se suministra en jeringas de 5ml estériles individualmente empaquetadas.
Composición:	VETIGEL® se compone de una mezcla patentada de polímeros de origen vegetal: alginato de sodio y poli (N-acetil-D-glucosamina, D-glucosamina). El adaptador de jeringa de VETIGEL® es un adaptador de rosca para conector Luer, compuesto por resina de nailon o de polipropileno autoclavables y biocompatibles. La punta dental VETIGEL® es una cánula dispensadora de punta roma con una angulación de 45°, con conector Luer, hecha de acero inoxidable 304 y polipropileno.
Mecanismo de acción:	VETIGEL® crea un sellado mecánico en el origen del sangrado y apoya la formación y estabilización de un tapón plaquetario localizado.
Modo de uso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar de sus envases una jeringa VETIGEL®, una punta dental y un adaptador de jeringa y ensamblarlos. 2. Cargar la jeringa presionando lentamente el émbolo hasta que el gel llegue al final de la punta dental. Con una gasa estéril, limpiar el exceso de gel que sale de la boquilla. 3. Identificar el origen del sangrado y retirar tanta sangre como sea posible para preparar la zona de aplicación. 4. Rellenar la zona de aplicación con el gel, comenzando por la parte más profunda y retirando la jeringa lentamente a medida que se llena el espacio. Al final de la aplicación, cortar el gel alejando la punta dental del sitio de extracción y hacia abajo, deslizándola sobre el tejido adyacente, para asegurar que el gel no se adhiere a la punta dental. 5. No se recomienda el cierre de la mucosa sobre el gel.
Advertencias y contraindicaciones:	Solo para uso en animales. No apto para uso humano. No apto para uso en caballos ni otras especies equinas. No apto para animales de producción. Producto de uso exclusivo para veterinarios. Manténgase alejado del alcance y de la vista de los niños. VETIGEL® y los accesorios dentales asociados (adaptador de jeringa y punta dental) se fabrican y distribuyen como dispositivos veterinarios de un solo uso. VETIGEL® no está diseñado para su uso como dispositivo de cierre de heridas. VETIGEL® no debe inyectarse intravascularmente. VETIGEL® no está diseñado para ser usado para el control de la menorragia. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia del adaptador de jeringa y las puntas dentales de VETIGEL® para su uso en procedimientos estériles no dentales.
Para más información:	Por favor, contacte con atención al cliente de VetPlus o revise las instrucciones de uso para indicaciones completas, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
Conservación:	Guardar el Kit Dental de gel hemostático VETIGEL® refrigerado a 2-8°C tras recibirlo. Todos los componentes del kit dental deben conservarse en la caja original para evitar daños en sus envoltorios. No congelar.
Envasado:	Cada Kit Dental VETIGEL® contiene: <ul style="list-style-type: none"> - Dos jeringas estériles de 5 ml de VETIGEL® individualmente empaquetadas - Dos adaptadores para las jeringas individualmente empaquetados - Dos sobres de puntas dentales (cada uno conteniendo dos puntas dentales) - Instrucciones de uso