



Administrador de comprimidos

Ref. Uds.

Administrador de comprimidos BUSTER con la punta de goma blanda hace que sea más fácil administrar la píldora sin causar daño a la boca. Se suministra en un dispensador de 10 unidades. Con adaptadores adecuados para dedos, cilindro transparente de longitud idónea con sujetador de comprimidos y émbolo con junta de goma. Una manera rápida y fácil para administrar pastillas en gatos y perros. Skin pack.

Instrucciones:

1. Rellene con agua potable el administrador
2. Ponga el comprimido en el soporte
3. Inserte el administrador de comprimidos y presione para que el comprimido sea automáticamente tragado por el paciente.

| | | |
|---|--------|----|
| Administrador de comprimidos BUSTER, skin pack, 1 unidad. | 273094 | 1 |
| Administrador de comprimidos BUSTER 10 uds. | 273090 | 20 |
| Administrador de comprimidos BUSTER 1 unidad (granel) | 273092 | 1 |
| Administrador de comprimidos BUSTER blando 10 uds. | 273093 | 20 |



BUSTER Bolsa de examen veterinario

Ref. Uds.

Un todo-en-uno para satisfacer las necesidades combinadas de los pacientes, el personal veterinario y de los dueños de mascotas. La bolsa de examen veterinario KRUUSE es una bolsa de fuerte nylon para los pacientes más pequeños de las clínicas veterinarias (gatos, perros pequeños y conejos). Una herramienta profesional diseñada para un uso intensivo y adaptada para satisfacer una amplia gama de tareas diarias:

- Sujeción suave
- Exámenes
- Vacunación
- Administración de fármacos

La bolsa de exámenes se abre por la parte superior (a lo largo de la espalda del paciente) usando 3 bandas anchas de velcro (apertura y cierre en la dirección correspondiente). Una cremallera doble da acceso a la cola. Dos pares de cremalleras (en la parte delantera y trasera de la bolsa) dan acceso a las patas y a las extremidades. El cuello lleva velcro para una apertura/cierre más fácil y rápida. Hecho de nylon resistente y a prueba de arañazos especialmente seleccionado por su rigidez y flexibilidad. El Nylon es transparente a los Rayos X. Lavar a máquina a 30°C.

| | | |
|---|--------|---|
| BUSTER Bolsa de examen veterinario, 2-4 kg, azul marino | 279801 | 1 |
| BUSTER Bolsa de examen veterinario, 0-2 kg, rojo | 279800 | 1 |
| BUSTER Bolsa de examen veterinario, 4-6 kg, verde | 279802 | 1 |
| BUSTER Bolsa de examen veterinario, 6-8 kg, celeste | 279803 | 1 |

