

# Vexoderm®

Terapia regenerativa para heridas de difícil cicatrización



#### Presentaciones disponibles:

- 9 x 4 cm
- 10 x 7 cm

Distribuido por:

**Urano Vet, S.L**

Avda. Santa Eulalia, 2

08520 El Prat de Llobregat

Barcelona- España

Nº entidad autorizada HCMR-0138

Teléfono asistencia técnica: 900 809 965

www.uranovet.com

Titular autorización de comercialización:

**Artinvet Innovative Therapies, S.L**

Parque Tecnológico de Bizkaia 800 2ª

48160 Derio

Bizkaia- Spain

Nº entidad autorizada: HCM-0238

www.artinvetmed.com

www.  
uranovet.com

+ información, videos y casos clínicos

900 809 965

Asistencia técnica

**Contenido:** 2 presentaciones: Matriz liofilizada de 9 x 4 cm. 1 vial de solución de hidratación | Matriz liofilizada de 10 x 7 cm. 2 viales de solución de hidratación. **Descripción del producto:** Vexoderm® es un apósito primario estéril destinado a mejorar las alteraciones de la piel. Compuesto por una matriz liofilizada con capacidad de absorción y regulación de la hidratación, y una solución con propiedades dermoprotectoras. **Recomendaciones de uso:** Se recomienda el cambio de Vexoderm® cada 7 días. En heridas necróticas o muy exudativas, revisar la herida a los 3-5 días para verificar su estado. Es muy importante mantener una correcta humedad y temperatura. La matriz puede utilizarse por ambos lados. **Instrucciones de uso:** Aplicación de Vexoderm® por primera vez. **1.** Hidratar la matriz utilizando toda la solución de hidratación. Para absorber toda la solución la matriz necesita cerca de 60". **2.** Limpiar la herida utilizando Ringer Lactato o suero salino. **3.** Colocar Vexoderm directamente sobre la herida cubriendo toda la zona afectada. **4.** Cubrir con un apósito secundario (gasa parafinada o film de poliuretano transparente) para mantener la humedad. En caso necesario fijar con esparadrapo. **5.** Recubrir el apósito secundario con algodón para mantener la temperatura. **6.** Utilizar venda elástica autoadherente o venda y esparadrapo para proteger y fijar el vendaje. Cambios posteriores de Vexoderm®. Vexoderm® se retira fácilmente y no se adhiere al lecho de la herida. **A.** Retirar con cuidado el apósito. **B.** Limpiar el exudado suavemente con Ringer: Lactato o suero salino atemperado sin tocar el lecho de la herida. **C.** Repetir los pasos 1 a 6 hasta el cierre total. **Conservación:** Mantener a temperatura ambiente en lugar seco.

Nº de registro zoosanitario: 03119-H

